

Чистящий раствор для ухода за жесткими газопроницаемыми контактными линзами Бостон™ Эдванс

Этот вкладыш содержит важную информацию.

Внимательно прочтите его и не выбрасывайте, чтобы обращаться к нему в будущем.

Чистящий раствор для ухода за жесткими газопроницаемыми контактными линзами Бостон Эдванс Специально создан для флюоросиликонакрилатных и силиконакрилатных жестких газопроницаемых контактных линз.

Ежедневное использование этого продукта будет предотвращать образование стойких отложений, которые нарушают комфортность ношения жестких газопроницаемых контактных линз.

- Возможно применение с кондиционирующим раствором Бауш и Ломб Бостон ЭДВАНС Комфорт Формула

СОСТАВ:

вода очищенная, хлорид натрия, фосфат натрия, диоксид титана, силиол, цедепал, фосфолипид, макон

УКАЗАНИЯ: ⚠

1. До начала манипуляций с линзами вымойте руки.
2. На ладони осторожно потрите каждую линзу с обеих сторон с несколькими каплями чистящего раствора (очистителя) Бостон Эдванс
3. УДАЛИТЕ ВСЕ СЛЕДЫ ОЧИСТИТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ТЩАТЕЛЬНОГО ОПОЛАСКИВАНИЯ КАК РЕКОМЕНДОВАНО ВАШИМ ВРАЧОМ-ОФТАЛЬМОЛОГОМ.
4. Поместите линзы в контейнер и залейте каждую свежим кондиционирующим раствором. Если очиститель попал в глаза, немедленно снимите линзы и промойте глаза проточной водопроводной водой до полного удаления очистителя. Если сохраняются дискомфорт в глазах, избыточное слезотечение, нарушения зрения или покраснение глаз, немедленно свяжитесь с Вашим врачом-офтальмологом.

Предосторожности:

- Никогда не используйте растворы повторно
- ВСЕГДА ДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ И ХРАНИТЕ ЛИНЗЫ В КОНДИЦИОНИРУЮЩЕМ РАСТВОРЕ. НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЛИНЗЫ В ОЧИСТИТЕЛЕ. ВСЕГДА ТЩАТЕЛЬНО ОПОЛАСКИВАЙТЕ ЛИНЗЫ, КАК РЕКОМЕНДОВАНО ВАШИМ ВРАЧОМ-ОФТАЛЬМОЛОГОМ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ОЧИСТИТЕЛЕМ И ПЕРЕД ТЕМ, КАК КЛАСТЬ ИХ В КОНДИЦИОНИРУЮЩИЙ РАСТВОР.
- Никогда не касайтесь кончиком флакона какой-либо поверхности, поскольку это может нарушить стерильность раствора
- Плотно закрывайте флакон после использования
- Всегда тщательно ополаскивайте руки перед манипуляциями с линзами
- Всегда тщательно мойте контейнер, хорошо его ополаскивайте и высушивайте на воздухе
- Используйте до истечения срока годности, указанного на флаконе

Осторожно:

ЭТОТ РАСТВОР НЕ ДОЛЖЕН ПОПАДАТЬ В ГЛАЗА. Храните в недоступном для детей месте.

Не используйте по истечении указанного срока годности.

Не используйте, если пластиковое кольцо на горлышке флакона сломано или отсутствует.

Не используйте, если у Вас аллергия на любой ингредиент этого раствора.

Выбросьте оставшийся раствор через 3 месяца с момента вскрытия флакона.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С МЯГКИМИ КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ

Хранить при комнатной температуре.

STERILE A

CE 0050



Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman St.
Rochester, NY 14609 USA



Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road, Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Made in Italy

Изготовитель: Бауш энд Ломб - Иом Спа, Виа Пасубио 34, 20846 Мачерно, Милан, Италия

Distributor: Optinova d.o.o. Gundulićeva 57, 10000 Zagreb, Hrvatska

L

Увозник и дистрибутор за Србију:
Ортоленс д.о.о, М.Смиљковића 1А, Лесковац

Импортер в РФ: ООО "Бауш энд Ломб", 115191, г.Москва, ул.Б.Тульская, д.11,
тел. (495) 969-2130, факс (495) 969-2129

BOSTON i BOSTON ADVANCE su zaštićene oznake Bausch & Lomb Incorporated.

BOSTON i BOSTON ADVANCE су заштићени знакови Bausch & Lomb Incorporated.

БОСТОН и БОСТОН АДВАНС - торговые марки Bausch & Lomb Incorporated.

© Bausch & Lomb Incorporated.

131083561-01