

Многофункциональный раствор для ухода за жесткими газопроницаемыми контактными линзами Бостон Симплиус

Этот вкладыш содержит важную информацию. Пожалуйста, внимательно его прочтите и не выбрасывайте, чтобы обращаться к нему в будущем.

Специально создан для жестких газопроницаемых контактных линз из флуоросиликонакрилата и силиконакрилата.

Описание и показания к применению:

Многофункциональный раствор Бостон СИМПЛИУС™ – это новый продукт в одном флаконе, который очищает, дезинфицирует и кондиционирует жесткие газопроницаемые линзы (ГПЛ). Он одобрен для использования с жесткими газопроницаемыми контактными линзами из флуоросиликонакрилата и силиконакрилата.

Многофункциональный раствор Бостон СИМПЛИУС™ удаляет белки и липиды с поверхности линз, а также предотвращает образование на них стойких отложений. Этот раствор также предназначен для ополаскивания линз, что удаляет с них разрыхленные отложения. Специальная мультиполимерная система кондиционирует линзу, что обеспечивает хорошее ее скольжение и равномерное увлажнение. Запатентованный увлажняющий агент поддерживает смачиваемость линзы. Этот состав разработан, чтобы обеспечивать успокаивающий эффект для Ваших глаз. Также он содержит консерванты с доказанной эффективностью для уничтожения вредных микроорганизмов. Этот раствор эффективен как для очистки, так и для дезинфекции, и не раздражает глаза при надевании линз.

Состав: вода очищенная, борная кислота, борат натрия, хлорид натрия, полиоксамин, гидроксипропилметилцеллюлоза, глюкам, гидроксикальцийфосфат, раствор полиаминопропил бигуанида, раствор глюконата хлоргексидина.

УКАЗАНИЯ: ⚠

Удалите пластмассовое кольцо с горлышка флакона. Не используйте раствор, если пластмассовое кольцо на горлышке флакона сломано или отсутствует.

1. Чтобы быть уверенным в соответствующей дезинфекции, следует соблюдать все инструкции, приведенные ниже: Вымойте руки мягким мылом (Осторожно – жидкое мыло может содержать суспензии на жировой основе).
2. Поместите линзы в пустой чистый контейнер и заполните свежим многофункциональным раствором Бостон СИМПЛИУС™. Оставьте линзы в растворе по крайней мере на четыре (4) часа или на ночь перед надеванием.
3. После вымачивания извлеките линзы из контейнера и тщательно потрите на ладони обе стороны линзы с двумя (2) – четырьмя (4) каплями многофункционального раствора Бостон СИМПЛИУС™ в течение двадцати (20) секунд. Дополнительного ежедневного очистителя не требуется.

4. Перед надеванием ополосните линзы в течение пяти секунд под струей раствора Бостон СИМПЛИУС. Обратите внимание: не требуется ополаскивания водой.
5. Тщательно мойте контейнер горячей водой и высушивайте на воздухе при каждом использовании. Внимание: во избежание микробного загрязнения, не касайтесь наконечником флакона каких-либо предметов. Держите флакон плотно закрытым, когда не пользуетесь им.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не используйте раствор, если у Вас аллергия на любой ингредиент этого раствора.
- Не использовать с мягкими контактными линзами.
- Следует соблюдать процедуры по уходу за линзами, рекомендованные Вашим специалистом.
- Несоблюдение этих процедур может привести к серьезным глазным инфекциям.
- Не касайтесь наконечником флакона каких-либо предметов, а также глаз, поскольку это может привести к микробному загрязнению раствора или повредить глаза.
- Всегда мойте руки перед любыми манипуляциями с линзами.
- Никогда не используйте раствор повторно. Всегда используйте свежий раствор для очистки и дезинфицирования линз.
- Держите флакон закрытым, когда не пользуетесь им, чтобы избежать микробного загрязнения или испарения.
- Не используйте каких-либо глазных лекарств вместе с этим раствором без консультации офтальмолога.
- Выберите оставшийся раствор через 3 месяца с момента вскрытия флакона.
- Не используйте по истечении указанного срока годности.
- **ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!**
- Контейнер для линз может быть источником микробного загрязнения и раздражения глаз. Контейнер следует каждый день мыть очистителем для контактных линз, споласкивать горячей водой и оставлять сохнуть на воздухе в открытом виде. Контейнер следует менять достаточно часто.

ВАЖНО: Если появляется раздражение или избыточное слезотечение, которое не проходит или усиливается, или Ваше зрение нарушается, прекратите использование линз и раствора и срочно проконсультируйтесь со своим офтальмологом.



STERILE A

CE 0050

Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman St.
Rochester, NY 14609 USA

EC REP
Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road, Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK
Made in Italy

Distributor: Optinova d.o.o. Gundulićeva 57, 10000 Zagreb, Hrvatska

Увозник и дистрибутор за Србију:
Ортоленс д.о.о, М.Смиљковића 1а, Лесковац

Иготовитељ: Bausch & Lomb - Iom Spa (Бауш энд Ломб - Иом Спа), Италија.
Адрес: Via Pasubio 34, 20846 Macherio, Milan, Italy (Виа Пасубио 34, 20846 Мачерио, Милан, Италија).

Импортер в РФ: ООО "Бауш энд Ломб", Россия, 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 11, тел. (+ 7 495) 969-2130, факс (+ 7 495) 969-2129.

BOSTON I BOSTON SIMPLUS su zaštitene oznake Bausch & Lomb Incorporated.

BOSTON и BOSTON SIMPLUS su заштићени знакови Bausch & Lomb Incorporated.

БОСТОН и БОСТОН СИМПЛИУС – торговые марки Bausch & Lomb Incorporated.

© Bausch & Lomb Incorporated.

I51083558-01