


Инструкция по применению содержит важную информацию об использовании и безопасности продукта. Пожалуйста, внимательно прочитайте ее и сохраните в качестве справочного материала на будущее. Контактные линзы всегда должны подбираться специалистом по контактной коррекции. Крайне важно следовать указаниям специалиста по контактной коррекции и всем инструкциям на этикетке для правильного использования контактных линз.

1 КАК НАЧАТЬ

ПРАВИЛЬНО



НЕПРАВИЛЬНО!

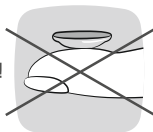

Линза вывернута

- Вскройте упаковку с линзами.
- Вымойте и насухо вытрите руки перед тем, как дотрагиваться до линзы.
- Положите линзу на подушечку указательного пальца и убедитесь, что линза не повреждена и не вывернута наизнанку (как на картинке выше).

2 КАК НАДЕВАТЬ ЛИНЗУ

АККУРАТНО
ПОМЕЩАЕМ
ЛИНЗУ
НА ГЛАЗ



ЕСЛИ ЛИНЗА
ПРИЛИПЛА -
ПОМОЖЕТ
МАССАЖ



- Положите линзу на подушечку указательного пальца руки.
- Посмотрите вверх и оттяните нижнее веко указательным пальцем второй руки.
- Аккуратно поместите линзу на глаз и поморгайте, чтобы линза встала на место.
- Если линза прилипла к глазу, закройте его и аккуратно помассируйте пальцем. Используйте увлажняющие капли для глаз ADRIA RELAX по мере необходимости.

3 КАК СНЯТЬ ЛИНЗУ

ИСПОЛЬЗУЕМ
«МЕТОД
ЩИПКА»



ХРАНИМ
В СВЕЖЕМ
РАСТВОРЕ



- Сдвиньте линзу на глазном яблоке вниз или в сторону, зажмите ее большим и указательным пальцем и снимите с глаза.
- Смените раствор в контейнере для линз на свежий и поместите туда линзу.

4 КАК ОЧИЩАТЬ И ХРАНИТЬ ЛИНЗЫ



Тщательно вымойте руки с мылом и насухо вытрите полотенцем.



Поместите обе линзы на ладонь, нанесите несколько капель на каждую и осторожно протрите их подушечкой указательного пальца свободной руки в течение 20 секунд.



Дополнительно ополосните линзы в новой порции раствора.



Поместите чистую контактную линзу в контейнер для хранения линз и заполните его свежим раствором для линз. Убедитесь, что линза полностью лежит в растворе.



Тщательно закройте контейнер.

ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЛИНЗЫ ЕЖЕДНЕВНОЙ ЗАМЕНЫ ADRIA, ПРОСТО УТИЛИЗИРУЙТЕ ИХ ПОСЛЕ СНЯТИЯ И НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ НАДЕНЬТЕ НОВУЮ ПАРУ ЛИНЗ.

5 ОСОБЫЕ СЛУЧАИ И ПОМОЩЬ ВРАЧА

**НЕМЕДЛЕННО
СНИМИТЕ ЛИНЗЫ
И ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ,
ЕСЛИ ВЫ ОЩУЩАЕТЕ:**

Боль в глазу, покраснение глаза, снижение остроты зрения, чувство жжения, зуд, дискомфорт, сухость глаза, ощущение инородного тела при ношении линзы, необычные или более обильные выделения из глаз, «затуманивание» зрения, появление радужных кругов и ореолов, появление светобоязни.

ПАРАМЕТРЫ ЛИНЗ. ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ

модель:	GO	O202	Morning Q38 vial	Morning Q55 vial	SPORT	SEASON
режим ношения:	дневной					
режим замены:	1 день	30 дней	180 дней	180 дней	30 дней	90 дней

ПАРАМЕТРЫ ЛИНЗ. ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ

модель:	COLOR	GLAMOROUS	ELEGANT	NEON	CRAZY	SCLERA-PRO
режим ношения:	дневной, (до 8 часов)	дневной, (до 8 часов)	дневной, (до 8 часов)	дневной, (до 6 часов)	дневной, (до 4 часов)	дневной, (до 3 часов)
режим замены:	90 дней					

ADRIA РЕКОМЕНДУЕТ!

Универсальный раствор
для линз ADRIA Comfort

