

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Гидрогель офтальмологический ВИЗМЕД® лайт 15 мл.

Пластиковый флакон-капельница объемом 15 мл.

Показания к применению:

Первичный синдром «сухого глаза» и симптоматика синдрома «сухого глаза» и/или повреждения передней поверхности глаз при поверхностном кератите и синдроме Шегрена. А также для увлажнения поверхности глаз при жалобах, не имеющих патологического происхождения: ощущение «сухости» глаз, чувство инородного тела, усталость глаз и прочее, - вызванных ношением жестких или мягких контактных линз, длительной работой с монитором компьютера, кондиционированием помещения, пылью, сухим воздухом, ветром или холодом.

Состав:

Основной компонент: гиалуронат натрия, высокоочищенный, полученный методом бактериальной ферментации.

1 мл раствора содержит: гиалуронат натрия 0,1 %, хлорид натрия, хлорид калия, динатрия гидрофосфат, дигидрофосфат натрия, цитрат натрия, хлорид магния, хлорид кальция, вода для инъекций, *этилендиаминтетраацетат натрия и полигексанид в качестве консервантов.* Раствор гипотонический (150 мОсм/л), доведен до pH 7.3.

Форма выпуска:

Стерильный гидрогель офтальмологический, содержащий 0,1% гиалуроната натрия, для местного применения, в многодозовом флаконе-капельнице объемом 15 мл.

Способ применения и дозы:

Перед первым использованием поверните заворачивающийся колпачок флакона против часовой стрелки до полного отделения запечатывающего кольца (рис.1). Запрокиньте голову назад и, расположив капельницу флакона сверху, закапайте 1-2 капли в конъюнктивальный мешок, слегка надавив на флакон (рис.2). Возможно легкое замутнение зрения в первые 1-2 минуты после закапывания. При моргании жидкость равномерно распределится по поверхности глаза, образуя идеально гладкое длительное защитное покрытие поверхности глаза прозрачным слоем. Визмед® лайт можно закапывать с любыми (жесткими или мягкими) контактными линзами, не снимая их и не замутняя зрения.

Предосторожности: Избегайте контактов кончика капельницы с поверхностью глаза и кожей. После использования Визмед® лайта заверните колпачок по часовой стрелке до упора (рис.3). При видимых повреждениях контейнера применять Визмед® лайт не следует. После вскрытия флакона раствор Визмед® лайта можно использовать в течение 3 месяцев. Хранить при температуре от 2°C до 25°C! Не использовать Визмед® лайт по истечении срока годности, указанного на упаковке. В случае, если во время использования Визмед® лайта дискомфорт сохраняется, необходимо проконсультироваться с врачом. Хранить в недоступном для детей месте!

Характеристики и действие препарата:

Визмед® лайт представляет собой раствор высокоочищенного гиалуроната натрия, полученного методом бактериальной ферментации. Гиалуронат натрия – натуральный полимер, который присутствует в тканях глаза человека. Его основная физическая характеристика – вязкоэластичность. Это означает, что Визмед® лайт имеет высокую вязкость между морганием и низкую вязкость во время процесса моргания, что обеспечивает эффективное обволакивание поверхности глаза, предотвращающее сухость и раздражение. Гиалуронат натрия также, обладая адгезивными свойствами и способностью задерживать воду, похож по действию на прероговичную слезную пленку, что совокупно с обволакивающим свойством приводит к увеличению продолжительности действия слезной пленки на поверхности глаза. Включение в состав Визмед® лайта цитрата натрия помогает поддерживать вязкоэластичные свойства препарата в присутствии других ионов.

Гипертоничность измененной слезной жидкости приводит к ее проникновению в роговичные царапины. Гипотоничность Визмед® лайта, компенсируя гипертоничность измененной слезной жидкости, ограничивает повреждение роговицы. Консерванты, присутствующие в Визмед® лайте, тщательно сбалансированы и обеспечивают стерильность раствора в течение 3 месяцев после вскрытия флакона.

Биологическая совместимость:

Результаты исследований острой, подострой и хронической токсичности совместно с результатами исследований плодной токсичности, фертильности, предродовой и послеродовой токсичности показывают, что гиалуронат натрия очень хорошо переносится. Экспериментальные и клинические испытания также подтверждают хорошую переносимость Визмед® лайта.

Лекарственное взаимодействие:

Одновременно применять Визмед® лайт с другими препаратами для лечения глаз не рекомендуется (рекомендуемый интервал не менее 30 мин), так как это может ухудшить действие препарата.

Срок годности: 2 года в оригинальной упаковке.

Упаковка: пластиковый флакон-капельница объемом 15 мл.

Рег. уд. №ФСЗ 2009/05290 от 23 октября 2009 года

Производитель: ТРБ Чемедика АГ (Германия)

Представитель в РФ:

Представительство ТРБ Чемедика Интернешнл С.А.

107065, Москва, Алтайская ул., д.5

Телефон: (495) 210-98-27 marketing@trbchemedica.ru

